


SCHEDA TECNICA
Ref. 05326 – CEROTTO PELLI SENSIBILI in striscia con PROTEZIONE
BATTERIOSTATICA



IMMAGINE PRODOTTO

Cerotto in striscia in non-tessuto: permette una traspirazione ottimale, si leva senza irritare la pelle. Indicato per le pelli più sensibili. Protegge la ferita dal contatto con gli agenti esterni e ne assorbe eventuali essudati. Il cerotto pelli sensibili, con il tampone trattato con principio batteriostatico per conferirgli una protezione batteriostatica, mantiene sotto controllo il microambiente della ferita. Contiene una soluzione lievemente ipertonica a base di esteri dell'acido lattico e del poliglicerolo che coadiuva un'azione preservante a livello della medicazione dall'attacco degli agenti esterni, grazie ad un bilanciamento del pH che rende l'ambiente non idoneo alla proliferazione batterica. Promuove un'azione osmotica.

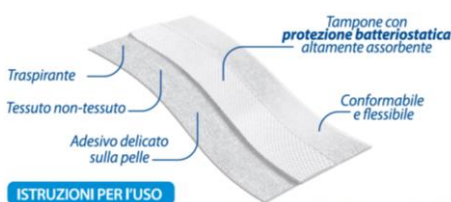

**La garza non contiene antibatterici e non
contiene argento che potrebbe provocare
sensibilizzazione allergica**



CODICE EAN: 8023766053266

CARATTERISTICHE PRODOTTO: cerotto non sterile per la copertura di piccole ferite superficiali

COMPOSIZIONE: Il cerotto è costituito da un supporto tessuto-non-tessuto adesivizzato, (polimero acrilico) su di un lato con una garza assorbente con batteriostatico.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Lavare le mani tagliare la striscia della misura desiderata applicarla con una leggera pressione
- Togliere le linguette di protezione dalla superficie adesiva del cerotto;
- Applicare il cerotto avendo cura di appoggiare la garza sulla parte interessata.
- Pulire la ferita e sostituire la medicazione quotidianamente
- Usare su ferite superficiali.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

5 PEZZI, 1 FORMATO 100X60MM

AVVERTENZE:

Conservare in luogo fresco asciutto e pulito.

Dispositivo medico monouso. Non riutilizzare; il riutilizzo del prodotto potrebbe provocare alterazioni delle sue prestazioni e possibili contaminazioni crociate.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 10 pezzi per confezione. 1 formato: 100 x60mm

CLASSIFICAZIONE: Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Dir. 93/42/CE e ss.mm.ii. e recepimenti.

AVVERTENZE:

Conservare in un luogo fresco, asciutto e pulito.

Dispositivo medico monouso: il riutilizzo del prodotto potrebbe provocare alterazioni delle sue prestazioni e possibili contaminazioni crociate